

## **Návod k aplikaci náplast'ových okluzorů:**

1. Odstraňte z oční náplasti papírovou krycí vrstvu.
2. Pokožku kolem oka očistěte, aby došlo k lepšímu přilnutí. Lehce zavřete obě oči a nechte uvolněné obličejové svaly.
3. Přiložte oční náplast.
4. Konečky prstů lehce přitlačte vnější okraj oční náplasti, abyste přilepili samolepicí pásku.

### **Odstranění:**

1. Uchopte oční náplast na straně u nosu a uvolněte kraj.
2. Prsty druhé ruky přidržujte kůži a pomalu, opatrným tahem, odstraňte náplast. Směr tahu by měl vždy vést směrem k uchu.
3. Při odlepování náplasti vždy přidržujte odhalovanou pokožku prsty druhé ruky.
4. V případě, že přilnutí náplasti je příliš silné, můžete náplast navlhčit, abyste mohli lépe uvolnit kraj a náplast odstranit.

## **Návod na aplikaci okluzorů s přísavkou:**

1. Přísavkový okluzor je určen k aplikaci na brýle, nelze ho použít, pokud dítě brýle nenosí. Čisté sklo i přísavka umožňují dokonalé přimknutí okluzoru na brýle.
2. Přísavkový okluzor dáváme přísavkou na vnitřní stranu skel u brýlí. (viz foto)
3. Přísavkový okluzor lze dle potřeby přistříhnout např. u sedel, aby bylo zajištěno dokonalé krytí. (viz popis typu okluzoru a fotogalerie)
4. Přísavkový okluzor lze přistříhnout i v dolní části okluzoru, pokud leží dítěti na tváři. V případě přistřížení nelze okluzor používat na druhé oko a při střídání očí je potřeba mít okluzory dva.
5. Přísavkový okluzor lze nosit celý den nebo jako doplněk po sundání náplasti.
6. Přísavkový okluzor lze používat k ortoptickému cvičení a všude tam, kde náplast dráždí oko a stresuje dítě